

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ДЕТАРТРИН та ДЕТАРТРИН Z, паста для скейлінгу

ВЛАСТИВОСТІ

Лінійка продуктів ДЕТАРТРИН доступна у вигляді готових для використання паст, розроблених для зняття зубних нашарувань та полірування зубів.

ДЕТАРТРИН та ДЕТАРТРИН Z - приємні на смак пасти рожевого кольору. Їх механічна абразивна дія зумовлена присутністю в складі кремнію, що робить можливим повне видалення зубного каменю після обробки ультразвуком або ручним скелером без утворення ерозій зубної емалі. ДЕТАРТРИН Z містить частки цирконію. Ці частки мають вигляд плоских скребків, сторони яких розділені дуже твердим краєм. Коли цю пасту втирають у шорстку поверхню, краї часток «збивають» нерівності. Ефірні олії, що входять до складу препаратів ДЕТАРТРИН та ДЕТАРТРИН Z, створюють відчуття свіжості, що дуже подобається пацієнтам. Крім того, їм властива легка бальзамічна дія: вони полегшують подразнення чутливих ясен, що може бути спричинене механічним зняттям зубних нашарувань.

ПОКАЗАННЯ

- Заключна обробка поверхонь після зняття зубних нашарувань,
- Видалення плям від їжі й тютюну,
- Тонке полірування пломб.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Візьміть шпателем необхідну кількість пасти й помістіть її на полірувальне колючатко.

Примітка. Під час або після закінчення процедури зняття зубних нашарувань можна виконувати полоскання ротової порожнини.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Можливі алергічні реакції на формальдегід.

ФОРМА ВИПУСКУ

Банка 45 г

Банка 150 г

Тільки для професійного використання в стоматології

- ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ УКАЗАНИХ НА МАРКУВАННІ:



Виробник



Застереження. Перед використанням ознайомитися з супровідними документами.



Дата виготовлення



Номер партії



Використати до



Знак відповідності технічним регламентам



СЕПТОДОНТ

58, Рю дю Пон де Кретей 94107 Сент-Мор-де-Фоссе – Франція

SEPTODONT

58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-des-fossés Cedex - France

